

Gebrauchsanleitung

laguna Duschhocker mit Armlehnen, mit Hygieneausschnitt

REF 78700 800



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Indikation/Kontraindikation

Der Duschhocker mit Hygieneausschnitt findet seine Anwendung im häuslichen Bereich. Er unterstützt Personen mit Bewegungseinschränkungen oder Standunsicherheiten, die durch fehlende Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten nach Verletzungen oder Krankheit verursacht sind, bei der Hygiene in der Dusche. Er fördert die Eigenständigkeit und Sicherheit, weil diese Personen so die Dusche im Sitzen eigenständig nutzen können. Der Hygieneausschnitt erleichtert die Intimhygiene. Die rutschhemmenden Gummifüße an den vier Stuhlbeinen sorgen für einen sicheren Stand. Bei Nichtgebrauch kann der Duschhocker aufgrund seines geringen Gewichts leicht aus der Dusche entfernt werden.

Der Duschhocker mit Hygieneausschnitt sollte nicht von Personen mit nicht ausreichend stabiler Rumpfhaltung zum Sitzen bzw. mit nicht ausreichender Restfunktion der oberen Extremitäten verwendet werden.

! Sicherheitshinweise !


- Personen, die schwerer als 150 kg sind, dürfen den Duschhocker, rund nicht benutzen!
- Personen, die die empfohlene Körpergröße von 145–200 cm unter- bzw. überschreiten, dürfen den Duschstuhl mit Hygieneausschnitt nicht benutzen.
- Die Benutzung des Duschhockers setzt die Fähigkeit voraus, eigenständig sitzen zu können. Der Duschhocker darf nicht verwendet werden, wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren!
- Verwenden Sie den Duschhocker nur in einwandfreiem Zustand!
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Duschhocker fest und sicher in der Duschkabine steht und alle 4 Hockerbeine die gleiche Höheneinstellung haben! Vergewissern Sie sich, dass alle Federstifte fest eingerastet sind!
- Ändern Sie die Höheneinstellung nicht, während Sie auf dem Duschhocker sitzen!
- Lehnen Sie sich nicht zu stark nach vorne, hinten oder zur Seite, während Sie auf dem Duschhocker sitzen, um ein Kippen zu vermeiden!
- Belasten Sie die Armlehnen beim Hinsetzen und Aufstehen nicht einseitig, um ein seitliches Kippen des Hockers zu vermeiden!
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor.
- Bitte beachten Sie, dass Ausrutschgefahr beim Hinsetzen und Aufstehen in nassen Duschkabinen besteht – insbesondere, wenn Sie Duschgel oder Seife verwendet haben!
- Benutzen Sie den Duschhocker nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung, nicht aber als Leiterrersatz oder Spielgerät!
- Kinder dürfen den Duschhocker nicht unbeaufsichtigt anwenden!

Lieferumfang


1 Sitz mit Hygieneausschnitt, 4 Hockerbeine, 4 Füße, 4 Befestigungsclips, 2 Armlehnen, 2 Befestigungselemente, 2 Schrauben für Befestigungselemente.

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Teilen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

1. Sitz (1x)
2. Hockerbeine (4x)
3. Füße (4x)
4. Befestigungsclips (4x)

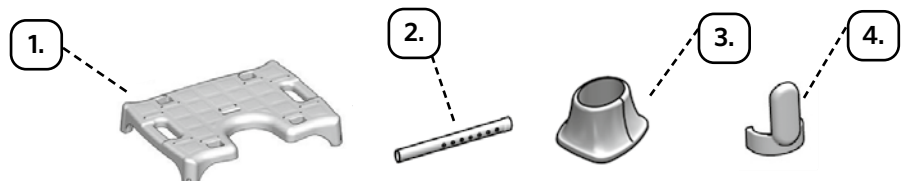

- 5. Armlehnen (2x)
- 6. Befestigungselemente (2x)
- 7. Schrauben zu Befestigungselementen (2x)
- 8. Blindstopfen (2x: 1x A, 1x B)

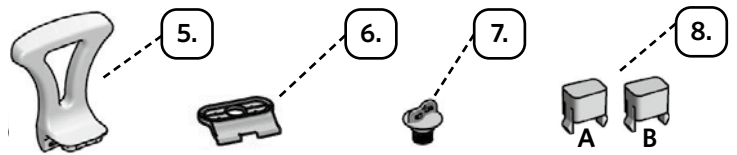

Montage

1. Legen Sie den Sitz mit der Unterseite nach oben zeigend vor sich.
2. Nehmen Sie nacheinander die 4 Hockerbeine und ziehen Sie den inneren Teil des Beines heraus. Dabei rastet der Federstift mit einem deutlich hörbaren Klicken in das erste Loch der Höhenverstellung des Hockerbeines ein (Abb. 1).
3. Stecken Sie nun nacheinander die 4 Hockerbeine in die Aussparungen an den Ecken des Sitzes. Das Loch im Hockerbein zeigt dabei nach außen (Abb. 2). Wenn es durch das Loch an der Ecke des Sitzes zu sehen ist, sitzt das Hockerbein richtig.
4. Setzen Sie nun die 4 Befestigungsclips in allen 4 Hockerbeinen ein. Der untere Teil des Befestigungsclips umschließt dabei das Stuhlbein (Abb. 3).
5. Setzen Sie nun die 4 Füße auf die 4 Hockerbeine. Dann drehen Sie den Hocker um und prüfen, ob alle Füße fest sitzen und gerade auf dem Boden aufliegen (Abb. 4).
6. Verschließen Sie die Öffnungen im hinteren Teil des Sitzes mit den mitgelieferten Blindstopfen A und B. Wenn Sie den Stuhl umdrehen, sehen Sie im Kunststoff die Buchstaben A und B eingestanzt, bitte setzen Sie die Stopfen entsprechend ein (Abb. 6).
7. Zur Montage der Armlehne stecken Sie diese in die seitliche Aussparung am Sitz (Abb. 7).
8. Während Sie die Armlehne festhalten, drehen Sie den Sitz um. Zur Fixierung der Armlehne benötigen Sie das Befestigungselement, dessen L-förmige Nasen durch die Schlitze der Armlehnen geführt werden müssen. Ein deutlich hörbares Klicken zeigt an, dass das Befestigungselement richtig sitzt. Nun kann die Armlehne mit einer der Schrauben fest mit dem Sitz verbunden werden (Abb. 8).
9. Verfahren Sie mit der zweiten Armlehne analog.
10. Sie können den Hygieneausschnitt entweder nach vorn oder nach hinten zeigend einsetzen.

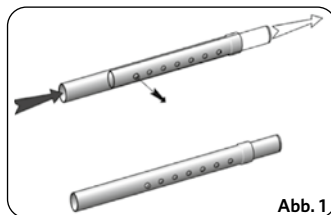


Abb. 1

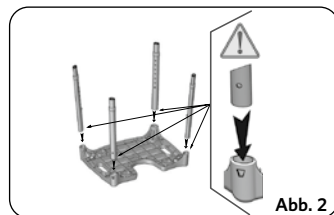


Abb. 2

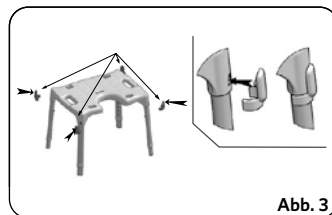


Abb. 3

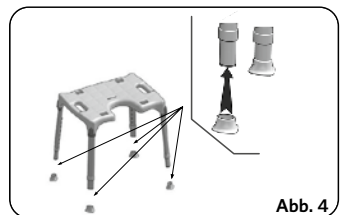


Abb. 4

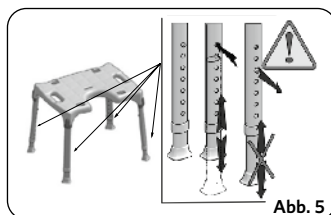


Abb. 5

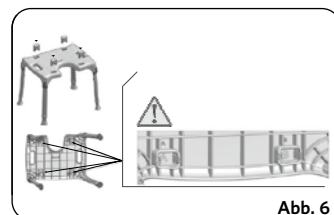


Abb. 6



Abb. 7

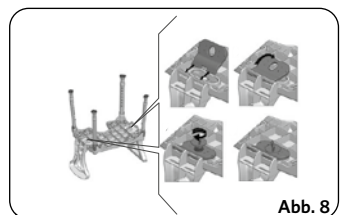


Abb. 8

Einstellung der Sitzhöhe:

Der Duschhocker kann auf 7 Sitzhöhen zwischen 39 und 54 cm eingestellt werden. Drücken Sie für die Einstellung der für Sie passenden Höhe den Federstift hinein und ziehen Sie den inneren Teil des Hockerbeines heraus. Der Federstift rastet mit einem hörbaren Klicken in das nächste Loch der Höhenverstellung. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Hockerbein die gewünschte Höhe hat. Genauso verfahren Sie mit den anderen Hockerbeinen (Abb. 5). Achten Sie darauf, dass alle 4 Beine in derselben Höhe eingestellt sind!

Reinigung/Desinfektion

Für die manuelle Reinigung sind warmes Wasser und ein neutraler Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem handelsüblichen, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

Material

Alle verwendeten Materialien sind korrosionsfrei bzw. gegen Korrosion geschützt:

- Sitz, Armlehnen inkl. Befestigung: Polypropylen mit 30% Calciumcarbonat
- Hockerbeine: eloxiertes Aluminium
- Federstifte: rostfreier Stahl
- Füße: thermoplastisches Gummi
- sonstige Teile: Polypropylen und Polyethylen

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer des Duschhockers mit Armlehnen beträgt drei Jahre, bei täglicher Anwendung und Reinigung, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in der Gebrauchsanleitung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es keine Beschädigungen aufweist und sich in einem sicheren Zustand befindet.


Wiedereinsatz/Wartung

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz ist es zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist es durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für einen Wiedereinsatz freizugeben. Der Duschhocker ist wartungsfrei. Sollten Sie einen eventuellen Verschleiß feststellen, sollten Sie Bauteile bei Ihrem Fachhändler austauschen lassen.

Entsorgung








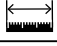



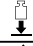





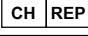




Entsorgen Sie den Duschhocker nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie vorher Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

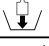

Technische Daten

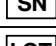- Gesamtmaße: 59 x 40-43 x 62,4-77,4 cm (L x B x H)
- Sitz: 46 x 33,5 cm (B x T)
- Sitzhöhe: mittig 39-54 cm
- Anzahl Einstellhöhen: 7
- Stellfläche: 51,5-54 x 41,4-44 cm
- Armlehnen: 26 x 23 x 6 cm (L x H x T)
- Breite zwischen den Armlehnen: 47 cm
- Gewicht: ca. 3,1 kg
-  150 kg
- Empfohlene Körpergröße: 145-200 cm

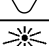Produktkennzeichnung

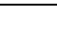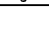In der folgenden Tabelle werden die für die Kennzeichnung von RUSSKA Produkten verwendeten Symbole erläutert. Der Übersetzungsschlüssel bezieht sich auf unser gesamtes Sortiment – bitte entnehmen Sie der Kennzeichnung Ihres erworbenen Produktes, welche Symbole tatsächlich relevant sind.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Hersteller des Produktes		eindeutige Produktidentifizierung (Unique Device Identification)
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz		Maximales Benutzergewicht
	Importeur		Maximale Gepäckzuladung
	Vertriebspartner		Maximale Breite
	CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte		Für Gebrauch in geschlossenen Räumen und im Freien konstruiert
	Medizinprodukt		Maximale Belastbarkeit
	Gebrauchsanweisung beachten		Maximale Greif-/Traglast
	Seriennummer		Maximale Beanspruchungskraft
	Chargenbezeichnung		Naturkautschuklatex ist enthalten oder anwesend
	Katalognummer		Vor Sonnenlicht schützen
	Herstellungsdatum		Trocken aufbewahren

 Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung. 

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.