


Montage- und Bedienungsanleitung für

STOCKHALTER FÜR TOPRO


Mit dieser Anleitung erhalten Sie unseren STOCKHALTER FÜR TOPRO speziell für den Rollator Topro-Troja und Topro-Troja 2G. Vorteil des Original-MPB-Stockhalters für Topro ist, dass er seitlich kaum aufrägt und so der Rollator kaum breiter wird.

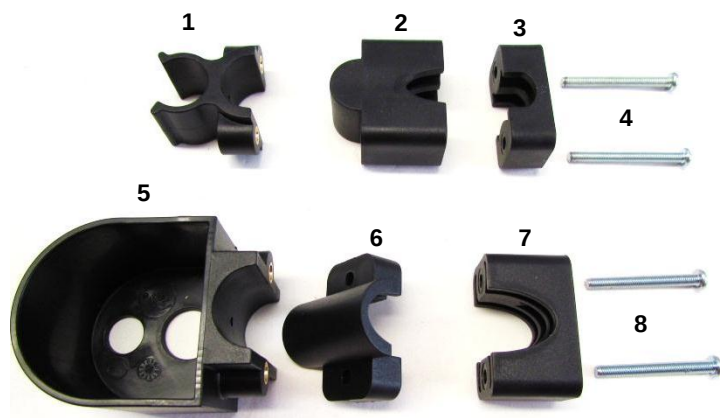


Inhalt:

- 1 – Stockhalteklemme
- 2 – obere halbe Schelle vorne
- 3 – obere halbe Schelle hinten
- 4 – 2x Schraube M5 x 50
- 5 – Stockhaltebecher
- 6 – untere halbe Schelle vorn
- 7 – untere halbe Schelle hinten
- 8 – 2x Schraube M5 x 45

Montage Stockhalteklemme oben:

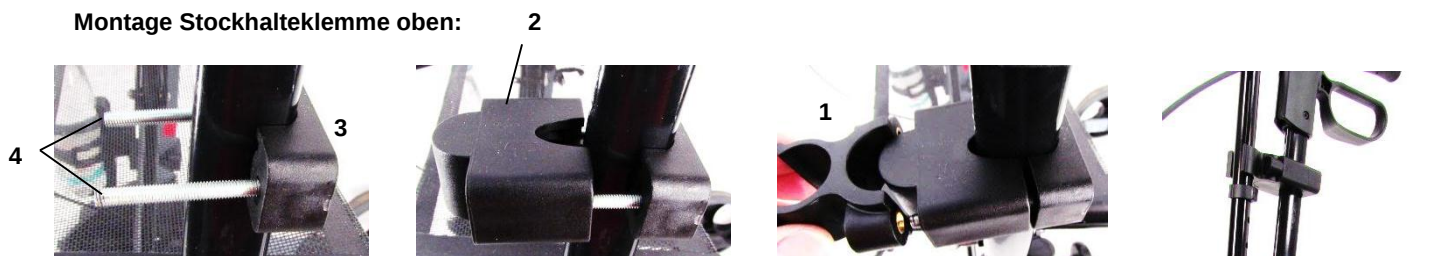

Montage Stockhaltebecher unten:

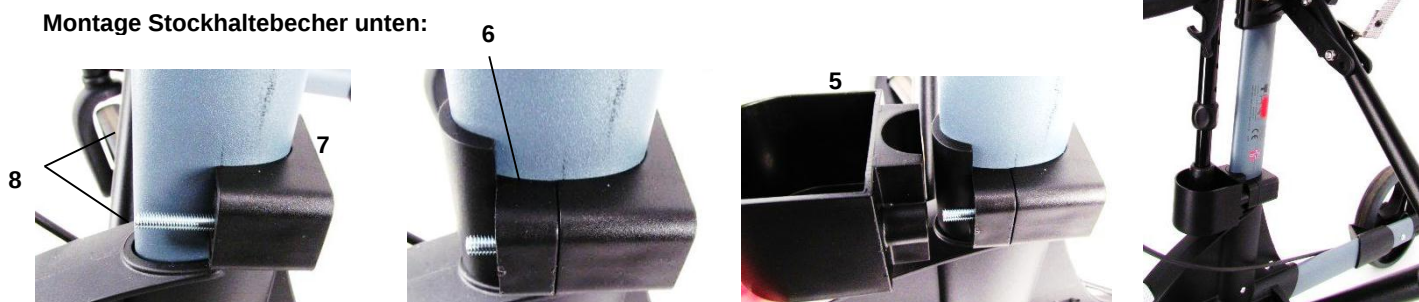

Bedienungsanleitung:

Stellen Sie Ihren Gehstock unten in den Stockhaltebecher und fixieren Sie ihn oben in der Stockhalteklemme.



Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann, bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB® STOCKHALTER FÜR TOPRO** und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.