



Wandgriff *Atlantic*



Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Wandgriff *Atlantic* erstmalig in Gebrauch nehmen und bewahren Sie diese für die spätere Verwendung auf.

Zweckbestimmung

Der Wandgriff *Atlantic* bietet aufgrund seiner Oberflächenstruktur und des Materials perfekten Halt und Sicherheit im Bad. Er dient der Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Dusch- und Badewanne für Personen, die in Ihren Bewegungen eingeschränkt sind und sich nicht sicher fühlen.

Montage

1. Überprüfen Sie den Inhalt und die Verpackung auf Vollständigkeit und Schäden.
2. Messen Sie die Abstände der Bohrlöcher aus und versuchen Sie, wenn möglich, diese in die Fugen zu platzieren, um Schäden am Fliesenspiegel zu vermeiden.
3. Bohren Sie die Löcher, verwenden Sie Dübel und schrauben Sie den Wandgriff *Atlantic* an der Wand fest.
4. Danach schieben Sie die losen Abdeckkappen auf die Befestigungsvorrichtung.

Sicherheitsanweisung

1. Prüfen Sie regelmäßig, am besten vor der Benutzung, den festen Sitz des Wandgriffes *Atlantic*.
2. Reißen Sie nicht an dem Wandgriff und nutzen Sie diesen nur zum Festhalten.
3. Die maximale Belastung des Wandgriffes ist 120 kg.
4. Benutzen Sie keinen defekten Wandgriff *Atlantic*.

Reinigung

Reinigen Sie den Wandgriff *Atlantic* regelmäßig mit einer milden Seifenlauge und klarem Wasser. Zum Trocknen benutzen Sie ein weiches Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Nach jeder Benutzung empfiehlt sich eine Trocknung mit einem weichen Tuch, um Ablagerungen zu vermeiden. Zum Desinfizieren des Wandgriffes verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel. Benutzen Sie zur Reinigung keinen Hochdruck- oder Dampfdruckreiniger!

Technische Daten/Maße und Gewicht

Länge: 30 cm/ 40 cm/ 45 cm/ 60 cm

Durchmesser des Wandgriff *Atlantic*: 3,5 cm (Griffstange)



Durchmesser Befestigungsvorrichtung: 8 cm

Tiefe des Wandgriffs (Abstand von der Wand): 7,5 cm

Gewicht: 300 g/ 370 g/ 420 g/ 600 g

Material: ABS und PVC

Maximale Belastung: 120 kg

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.



Daimlerstrasse 12 a
D-25337 Elmshorn
Tel.: (0)4121 4733 12
Fax: (0)4121 4733 23
www.rehaforum.com
info@rehaforum.com

Art. 13168184 (30 cm)

Art. 13168190 (40 cm)

Art. 13168215 (45 cm)

Art. 13168221 (60 cm)