

ROTH Edelstahlplatten Best. Nr. 1461412

Die Sicherheit für Ihren MOBELI Sauger!

Bestehend aus einer Edelstahlplatte (Bild 1)
mit aufgeklebtem doppelseitigem Spezialklebeband.



**Unbedingt vor der Benutzung
diese Informationen durchlesen!**

Bedienungsinfo unbedingt aufbewahren und an weitere Benutzer weitergeben!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Edelstahlplatten zum Aufkleben
bei z.B. Naturstein (Marmor), zu kleinem Fliesenmaß.
auf luftdurchlässige Fliesen; passend für ROTH MOBELI Produkte.



Bitte beachten: Vor dem Aufkleben der Edelstahlplatten die geeignete Position für den ROTH Sauger und somit für die Edelstahlplatten ermitteln. Niemals die Edelstahlplatten auf gerissene oder abgesplitterte Fliesen kleben, nur auf plane Flächen, z.B. Mosaik, Naturstein usw., jedoch nicht auf Putz, Tapete o.ä.!

Nur für MOBELI Produkte mit einem Sauger geeignet (z.B. den Brausepositionierer, Klemmhilfe etc. ...)!

Aus Sicherheitsgründen dürfen die Edelstahlplatten nur für ROTH MOBELI Qualitätsprodukten verwendet werden. Eine Verwendung von anderen Produkten auf den Edelstahlplatten ist wegen erhöhter Unfallgefahr nicht zugelassen!!



Ankleben:

Um eine optimale Haftung der Edelstahlplatte auf der Fliese zu erreichen, **muss die Fliese durch entfernen der Fett-, und Staubschicht mit Hilfe von Verdünnung oder einer vergleichbaren fettlöslichen Flüssigkeit gereinigt werden. Nach dem Reinigen muss darauf geachtet werden, dass die Fliese vollständig ablüftet.**



Nach dem Reinigen der Fliese, die Schutzfolie von der Klebeschicht abziehen. Anschließend die Edelstahlplatte auf der Fliese ausrichten und **ca. 30 Sekunden fest andrücken.**



Achtung!: Den MOBELI Sauger erst nach 8 Stunden anbringen, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Edelstahlplatte von der Wand löst (Klebermasse fließt in die Poren des Wandbelages und verfestigt sich dort).

Lösen:



Um die Edelstahlplatten von der Fliese zu lösen sollte man z.B. mit einem Umreifungsband (Bild 3) oder einer Schnur den Schaumstoff hinter der Fliese auftrennen. Dazu aus Sicherheitsgründen Schutzhandschuhe anziehen. Ein Keil unter der teilweise gelösten Fliese erleichtert dabei das Beseitigen des restlichen Schaumstoffes.

Die zurückbleibenden Kleberreste können mit dem Finger entfernt werden (Bild 4). Die Edelstahlplatte kann nach dem Entfernen nicht wieder verwendet werden.



Entsorgung:

Die Verpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmittelverwertung zugeführt. Die Entsorgung muß gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.