

ART.-NR 07036

GERADEHALTER

Optimale Körperhaltung mit Bewegungsfreiheit

GEBRAUCHSANWEISUNG D

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes Fachgeschäft oder direkt an uns.

FUNKTION

Der Geradehalter sorgt für eine verbesserte Haltung des Oberkörpers, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Die Korrekturfunktion dieser Rumpforthese basiert auf verstellbaren Schulterzügeln.

Die textile Rückenanlage ist mit flexiblen Metallstäben verstärkt und unterstützt die Aufrichtung der Brustwirbelsäule zusätzlich.

Der Geradehalter fördert die aktive Kräftigung der eigenen Stütz- und Haltemuskulatur.

Das vollelastische, luftdurchlässige Material der Orthese trägt unter der Kleidung nicht

auf, sorgt für hohen Tragekomfort sowie für einen optimalen Sitz.

INDIKATIONEN

_ Haltungsschwäche

KONTRAINDIKATIONEN

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen:

- _ Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche.
- _ Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen.
- _ Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden).

NEBENWIRKUNGEN

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften allgemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtigen Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen bekannt.

Druckerscheinungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können unter Berücksichtigung etwaiger Kon-

GERADEHALTER

 SPORLASTIC

trindikationen und bei nicht einengender, formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichendsicher vermieden werden.

ANLEGEN

- _ Schlüpfen Sie mit Ihren Armen in die Schulterzügel des Geradehalters wie bei einem Rucksack. dabei liegen die überkreuzt vernähten Gurte auf der Innenseite.
- _ Die Zugwirkung der Schulter Schlaufen kann je nach Korrekturbedarf eingestellt werden. Hierfür verstellen Sie die Gurtlänge an den vorgesehenen Ösen.
- _ Der Taillengurt wird vorn über dem Bauch verschlossen, dessen Länge ebenfalls variabel ist.

WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusam-

menhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden.

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

Bitte führen Sie die Verpackung dem örtlichen Wertstoffsammelsystem zu.

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft in Verbindung zu setzen.

PFLEGE

Wir empfehlen, den Geradehalter schonend in handwarmem Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen.



SPORLASTIC GmbH

Medizinische Produkte

Weberstraße 1 _ 72622 Nürtingen _ Germany
Postfach 14 48 _ 72604 Nürtingen _ Germany

Telefon +49 70 22/70 51 81 _ Fax +49 70 22/70 51 13
info@sporlastic.de _ www.sporlastic.de