

**Herzlichen Dank für Ihre Wahl der 1000
Lumen Trionic LED Frontleuchte.**




Diese Anleitung zeigt sowohl die Befestigung des Leuchtenhalters und der Leuchte an einem Walker (linke Spalte unten) als auch die Befestigung an einem Veloped (rechte Spalte unten). Auf dem linken Foto zeigt **A** die Halterungsbefestigungsteile für einen Walker (2 Schrauben + 2 Unterlegscheiben). **B** zeigt die Halterungsbefestigungsteile für ein Veloped (1 Schraube + 1 Rändelmutter + 1 Mutter).

Befestigung des Leuchtenhalters


Montagehinweis für einen Walker




A1. Suchen Sie oben auf dem schwarzen halbvertikalen Rohr die beiden Schrauben, die das Griffrohr vor dem Bremshebel festklemmen.

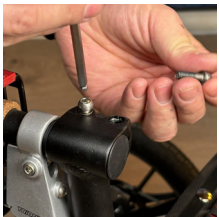


A2. Lösen Sie beide Schrauben mit dem 5-mm-Inbusschlüssel, der im Lieferumfang der LED-Leuchte enthalten ist.

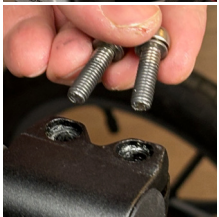

A3. Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Griffklemme.

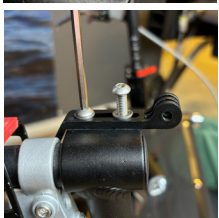


A4. Platzieren Sie den Lichthalter oben auf der Griffklemme, wobei die runde und geschlitzte Lichtbefestigung nach vorne und oben zeigt. Führen Sie die beiden Schrauben mit Scheiben in die Löcher der Klemme ein.

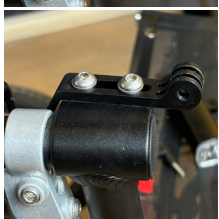

A5. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit dem 5-mm-Inbusschlüssel fest.

HINWEIS: Es ist wichtig, dass Sie die Schrauben richtig festziehen, da sie das Griffrohr mit seinem Gummigriff und dem Bremshebel sichern.


Montagehinweis für ein Veloped

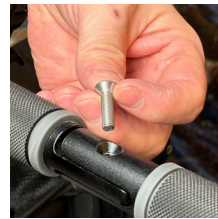

B1. Suchen Sie die Schraube am mittleren Klappgelenk des U-förmigen Griffbogens des Veloped. Lösen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten 4-mm-Inbusschlüssel und entfernen Sie sie.




B2. Ersetzen Sie die alte Schraube durch die längere Schraube, die im Lieferumfang der LED-Leuchte enthalten ist. Befestigen Sie die längere Schraube am Klappgelenk und ziehen Sie sie mit dem 4-mm-Inbusschlüssel fest.

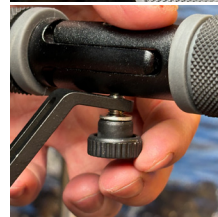

B3. Befestigen Sie das kurze abgewinkelte Ende des Leuchtenhalters am unteren Ende der Schraube an der Unterseite des U-förmigen Griffbogens. Der Halter sollte nach unten zeigen. Befestigen Sie den Halter mit einer Scheibe und der Rändelmutter, die Sie mit den Fingern festziehen.




B4. Für eine sicherere Befestigung des Halters, die verhindert, dass sich der Halter unbeabsichtigt zur Seite dreht, ersetzen Sie die Rändelmutter durch die mitgelieferte Edelstalmutter und ziehen Sie sie mit einem 10-mm-Schraubenschlüssel fest.

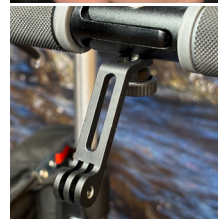

B5. Dieses Foto zeigt den richtig angebrachten Leuchtenhalter.

Befestigung der LED-Leuchte

Montagehinweis für einen Walker

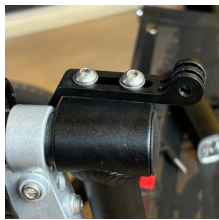


A6. Identifizieren Sie das runde vordere Ende des Leuchtenhalters mit zwei Schlitten zur Befestigung der Leuchte.



A7. Schieben Sie die geschlitzte Halterung der Leuchte in die Schlitten des Halters und achten Sie darauf, dass sie ausgerichtet sind. In Fahrtrichtung des Walkers gesehen, führen Sie die mitgelieferte Flügelmutter von links ein und ziehen Sie sie fest.

Montagehinweis für ein Veloped

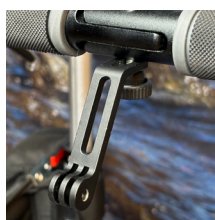


B6. Identifizieren Sie das runde vordere Ende des Leuchtenhalters mit zwei Schlitten zur Befestigung der Leuchte.



B7. Schieben Sie die geschlitzte Halterung der Leuchte in die Schlitten des Halters und achten Sie darauf, dass sie ausgerichtet sind. In Fahrtrichtung des Velopeds gesehen, setzen Sie die mitgelieferte Flügelmutter von rechts ein und ziehen Sie sie fest.

Anweisung

Übersicht

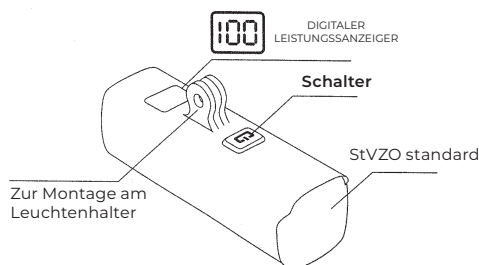

Vorsicht

Es ist normal, dass der Akku während des Ladevorgangs eine hohe Temperatur (bis zu 40°C / 104°F) erreicht, da chemische Reaktionen im Akku stattfinden. Der Akku kann auch warm werden, wenn er vor dem Laden nicht vollständig entladen wurde.

Mehrere Faktoren können die Lebensdauer des Akkus beeinflussen, darunter die Zellart, Belastung durch Nutzung, Wartungsroutine, Temperatur und die Anzahl der Ladezyklen. Im Allgemeinen führt eine höhere Akkukapazität zu einer längeren Betriebszeit.

Die Akkukapazität kann nach 300–500 Lade-/Entladezyklen auf etwa 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität sinken. Bei richtiger Pflege kann der Akku eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren erreichen.

Die Wasserfestigkeit gilt nur für Regenwasser. Tauchen Sie den Akku oder die gesamte Lampe beim Reinigen nicht ins Wasser. Reinigen Sie die Lampe bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch.

Akkuleistung

Die Akkuleistung wird erheblich von Temperaturschwankungen beeinflusst:

- Niedrige Temperaturen:** Bei 0°C sinkt die Kapazität um 5–10 %, wodurch die Betriebszeit um 50 % reduziert wird. Bei -20°C nimmt die Kapazität um 30 % ab, was die Betriebszeit um bis zu 70 % verkürzen kann. Die Leistung normalisiert sich wieder, sobald die Temperatur auf 20°C ansteigt.
- Selbstentladungsrate:** ABei Raumtemperatur verliert der Akku etwa 1 % seiner Kapazität pro Tag. Bei Lagerung bei 40°C erhöht sich die Selbstentladungsrate, was zu einem Verlust von etwa 5 % der Kapazität pro Tag führt.

Um die optimale Akkuleistung zu erhalten, vermeiden Sie extreme Temperaturen und lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort. Wenn der Akku längere Zeit nicht genutzt wird, laden Sie ihn alle 3 Monate auf.

Absicherter modus


Wenn die Batterie schwach ist, wechselt das Licht automatisch in den 50-Lumen-Fernlicht-Sicherheitsmodus und leuchtet für weitere 30 Minuten.

So bedienen Sie das Licht

Drücken und halten Sie den Schalter 2 Sekunden lang, um das Licht ein- oder auszuschalten. Klicken Sie einmal, um durch die Modi zu wechseln, und doppelklicken Sie, um den Ultra-Hell-Modus (1000 lm) zu aktivieren.

Modus	Laufzeit	Lichtleistung
100 % festlicht ▼ EIN KLICK	3,5 h + 30 mins ABSICHERTER MODUS	600 lm
50 % festlicht ▼ EIN KLICK	4,5 h + 30 mins ABSICHERTER MODUS	300 lm
25 % festlicht ▼ EIN KLICK	14 h + 30 mins ABSICHERTER MODUS	150 lm
Langsames Blinken ▼ EIN KLICK	14 h + 30 mins ABSICHERTER MODUS	
SOS ▼ EIN KLICK	14 h + 30 mins ABSICHERTER MODUS	
▼ DOUBLE CLICK Ultra hell-Modus	2,5 h + 30 mins ABSICHERTER MODUS	1000 lm


Die Lieferung enthält

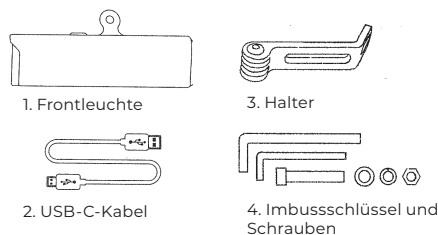

Laden & Powerbank

Öffnen Sie die Gummiabdeckung, um auf die Anschlüsse zuzugreifen.

POWER BANK
USB-A-Anschluss zum Laden anderer Geräte, z. B. Telefon, Rücklichter oder Schrittzähler.

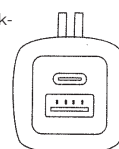

USB-C
USB-C-Anschluss zum Laden der Powerbank. Schließen Sie das Kabel an das Ladegerät an (max. 5V).

