

TRIONIC

Trionic Walker Rückengurt – Montagehinweis

Der ergonomische und gepolsterte Rückengurt, aus wasserabweisendem und haltbarem 600D Polyester, ist passend für die Rollatoren Walker 9er, 12er und 14er. Damit hat man beim Sitzen auf dem Rollator eine angenehme und sichere Stütze für den Rücken.

Die Länge/Tiefe des Rückengurtes ist verstellbar.

1. Entfernen Sie die Schrauben und die Muttern von den beiden Klammern.

2. Öffnen Sie die Klammern ein wenig, und befestigen Sie die Klammern auf die Griffrohre.

WICHTIG:

Überprüfen Sie die Position der "TRIONIC" Logotype, da der Rückengurt gewinkelt ist.



3. Schieben Sie die beiden Klammern ganz nach oben. Es kann sein, dass Sie die Schraube des Bremshebels ein wenig lösen müssen, um den Bremshebel ein Stück nach hinten zu bewegen.





4. Mit einem 4 mm Im-
bussschlüssel, befestigen Sie
die beiden Klammern mit den
Schrauben und Mutten. Das
Band des Rückengurtes soll,
vorn von der Klamme, auf bei-
den Seiten nach vorn positio-
niert sein.

5. Diese Foto zeigt die
korrekte Montage.



Um den Rollator zusammen-
zuklappen, kippen Sie zuerst
den Rückengurt nach oben.

Wenn Sie den Rückengurt zu
kurz/zu lang finden, können
Sie die Länge verstellen. Ent-
fernen Sie die beiden Schrau-
ben und Muttern und bauen
Sie den Rückengurt wieder
zusammen.

