

KRYOTHERM® natur Moorkissen

Erwärmen in der Mikrowelle

- Bei 600 Watt ca. 1 – 3 Minuten erwärmen
- Bei Bedarf in 30-Sekunden-Intervallen solange weiter erwärmen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist
- Verfügt die Mikrowelle über einen Drehteller bitte darauf achten, dass dieser sich frei drehen kann

Erwärmen im Wasserbad

- Bei max. 80 °C ca. 5 – 10 Minuten erhitzen – nicht kochen!
- Nach dem Erwärmen das Moor-Wärmekissen durchkneten, Inhalt verteilen und die Temperatur prüfen

Achtung! Artikel **8616** nicht im Wasserbad erwärmen!

Bitte beachten

- Niemals unbeaufsichtigt erwärmen
- Bei Überhitzung kann die Folie platzen

Anwendung als Kältetherapie

- Für eine Anwendung mit Kälte legen Sie das Moorkissen für mindestens 2 Stunden bei +3°C bis +6°C in den Kühlschrank
- Das Moorkissen niemals einfrieren!

Materialien

- Füllung: 100 % Naturmoor
- Bezug: siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- Reinigen Sie das Moorkissen nach Gebrauch mit einem alkoholfreien Reinigungsmittel, weichem Tuch und/oder unter fließendem Wasser
- Anschließend sorgfältig abtrocknen
- Kratzer unbedingt vermeiden

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

Art./REF	Bezeichnung	Bezug	Größe	Dessin
8615	KRYOTHERM® natur Moor-Wärmekissen XXL	kein	31 x 48 cm	-
8616	KRYOTHERM® natur Moor-Wärmekissen Velour einseitig	kein	21 x 38 cm	-
8617	KRYOTHERM® natur Moor-Wärmekissen Nacken/Schulter	kein	50 x 20 cm	-
8630		Kuschelbezug		apfel, feuer, anthrazit, mint, blau
8618	KRYOTHERM® natur Moor-Wärmekissen	kein	21 x 38 cm	-
8631		Kuschelbezug		apfel, feuer, anthrazit, mint, blau
8619	KRYOTHERM® natur Moor-Wärmflasche	kein	18 x 23 cm	-
8632		Kuschelbezug		apfel, feuer, anthrazit, mint, blau